



Masque Textile 10



Masque individuel à usage des professionnels
en contact avec le public - Catégorie 1

Réf. 94683 - Par lot de 200

Ce masque de type «masque barrière» conformément au guide AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020 est un équipement de travail tel que défini par la note d'information des Ministères de la Santé, de l'Economie et des Finances et du Travail du 29 mars 2020

Domaine d'utilisation

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités** (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Il permet d'assurer une protection des collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

Performances

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 6 avril 2020.

Masque catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

- Efficacité de filtration des particules de 3 μm : 91 %
- Efficacité de filtration des particules de 1 μm : 76 %
- Respirabilité : essai de perméabilité à l'air 223 L.m²/S pour une dépression de 100 Pa

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars et 6 avril 2020

RP/20-2167/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1 – AFNORS76-001.

Rétention des projections

Usage rétention des projections : flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur, à l'expiration.

Perméabilité à l'air (en L.m-2.s-1)	Efficacité de protection aux aérosols (en %)		
	Particules 3 μm	Particules 1 μm	Particules fines 0,2 μm
à dépression 100 Pa			
223	91	76	Non mesurée

Masque Textile 10



Première utilisation

IMPÉRATIF : NE PAS PORTER CE MASQUE NON LAVÉ.

Laver le masque à 60°C pendant 30 minutes avant la première utilisation.

Caractéristiques techniques

Composition : 97% Polyester 1% Coton 1% Polyamide 1% Élasthanne.

Dimensions : 28 x 16 cm.

Fabriqué en France.



Recommandations de manipulation du masque

- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.
- Le temps de port du masque est **limité à 4 heures**.
- Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher, ne pas déplacer le masque.
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.
- Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique.
- Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Méthode de lavage et séchage

Lavage en machine ménager à 60°C dans un sac de lavage avec détergent classique.

Sécher à l'air libre, à plat.

Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois. Pas de repassage nécessaire.

Stockage

Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Il ne se substitue pas aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR).